


# NÁVOD K POUŽITÍ

## Vedení

Před použitím si pečlivě prostudujte pokyny.

Katalogové číslo	
3M1R500	3 kohouty, 500 psi, On/Off

Typická struktura vedení: Vedení se obvykle skládá ze samičího konektoru Luer, přepínací rukojeti, základní desky, samičího konektoru Luer (a z prodlužovací trubice) (viz graf 1).

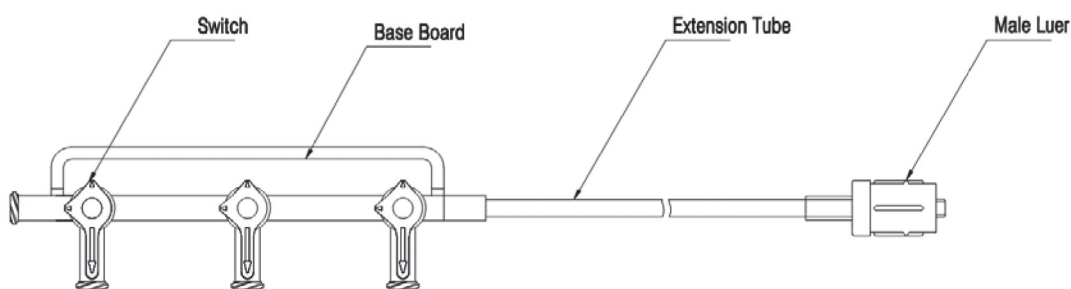

Graf 1

## Zamýšlené použití

Vedení je určeno pro propojení mezi zařízeními, jako je injekční stříkačka, angiografický katétr, infuzní sada do láhve přivádějící kontrastní látku nebo proplach fyziologického roztoku, nebo se systémem pro sledování tlaku atd. Každý kanál kapaliny lze nezávisle ovládat spínačem.











## Návod k použití

1. Zkontrolujte, zda je obal správně utěsněn bez poškození.
2. Zkontrolujte vedení a před použitím ho propláchněte normálním fyziologickým roztokem.
3. Konektory vedení Luer připojte k ostatním zařízením.
4. Rukojeti kohoutů otočte do otevřené polohy.
5. Našroubujte kohouty vedení do řídicího toku.

## Varování

- Před použitím si přečtěte pokyny.
- Zařízení je určeno jen pro jednorázové použití. Neprovádějte opětovnou sterilizaci a/nebo ho opětovně nepoužívejte.
- Nepoužívejte ho po datu použitelnosti.
- Nepoužívejte, pokud byl sterilní obal poškozen nebo správně netěsní.
- Konektor Luer musí být správně zapojen, nesprávné zapojení nebo netěsné zapojení může způsobit netěsnost nebo průnik vzduchu do cévy.
- Neinjikujte vzduch do cévy.
- Doporučený provozní tlak je do 500 psi.
- Jen pro použití kvalifikovanými lékaři.
- Zařízení po použití zlikvidujte podle místní legislativy.

## Značky a vysvětlivky

 Sterilizováno ethyleno-axidem	 Číslo šarže Číslo dávky	 Výrobce	 Nepoužívejte opakovaně
 Datum použitelnosti	 Pozor	 Pouze kvalifikovaní lékaři	 Obsah
 Katalogové číslo	 Datum výroby		

## Skladování

Skladujte na chladném, suchém a tmavém místě.

Datum použitelnosti (datum expirace) viz štítek.

## Výrobce

Accura Medizintechnik GmbH

Max-Planck-Straße 33

611 84 Karben

Německo



## Distributor

CZ Pharma, s. r. o.

Náměstí Smiřických 42

281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Česká republika



**Stav: 2011-05-22**

DMK-I-02E,C/1

