

NÁVOD K POUŽITÍ

Oční roušky

Zamýšlené použití

Tyto zdravotnické prostředky jsou sterilizovány EO a používají se jako fyzická bariéra zabráňující průniku tekutin i mikrobiální penetraci mezi pacienty a prostředím operačního sálu, mezi jinými chirurgickými nástroji a přístroji a zdravotnickým personálem přítomným na operačním sále.

Kontraindikace

NEJSOU ZNÁMÉ

Sterilita

Chirurgické roušky Sidapharm pro oftalmologii jsou sterilizovány ethylenoxidem. Nepoužívejte je, pokud je jejich obal otevřený nebo poškozený.

Tipy pro zajištění bezpečnosti

Chirurgické roušky pro oftalmologii se vyrábějí v různých provedeních podle typu výkonu, pro který jsou vhodné, jak je specifikováno v tabulce níže.

PROVEDENÍ CHIRURGICKÉHO ROUŠKY	ÚROVEŇ OCHRANY PODLE NORMY EN ISO 13795:2013	POUŽITÍ
CHIRURGICKÝ ROUŠKA POSKYTUJÍCÍ STANDARDNÍ ÚROVEŇ OCHRANY	STANDARDNÍ ÚROVEŇ OCHRANY	ZÁKROKY S NÍZKÝM / VYŠŠÍM OBJEMEM TEKUTIN
CHIRURGICKÝ ROUŠKA POSKYTUJÍCÍ VYSOKOU ÚROVEŇ OCHRANY	VYSOKÁ ÚROVEŇ OCHRANY	ZÁKROKY S VELKÝM OBJEMEM TEKUTIN











Chirurgické roušky vybírejte podle rizika kontaminace tělesnými tekutinami a jejich objemu při konkrétním zákroku.

- Na obalech je natištěný symbol, který informuje, že byl operační rouška sterilizován ethylenoxidem. Zkontrolujte, zda odpovídá uvedená barva roušky. Obsah balení nepoužívejte, pokud jeho barva neodpovídá barvě uvedené na obalu.
- Chirurgické roušky pro oftalmologii jsou baleny při dodržení zásad aseptické techniky.
- Jestliže je sterilní obal nějak poškozený, může být narušena sterilita výrobku. V takovém případě obsah poškozeného balení zlikvidujte.
- Sterilní obaly tvoří zdravotnický papír a snímatelný plastový film. Otvírejte je, prosím, aseptickou technikou.
- Je-li překročena doba skladovatelnosti, rouška nepoužívejte.
- Stabilita během doby skladovatelnosti se testuje v rámci studie při pokojové teplotě 37 °C. Jestliže bude při skladování překročena teplota 37 °C, sterilita se tím může narušit.

Skladování

Doporučujeme chirurgické roušky skladovat při teplotě do 37 °C. Nepoužívejte je po uplynutí doby expirace.

Značky a vysvětlivky

 Sterilizováno etylenoxidem	 Číslo dávky	 Výrobce	 Označení CE a číslo notifikovaného orgánu
 Datum expirace	 Datum výroby	 Nepoužívejte, jestliže je obal poškozený	 Nepoužívejte opakovaně
 Katalogové číslo	 37 °C Maximální skladovací teplota		

Výrobce

SIDAPHARM GREECE
MOCHINTRA AM. DIANA
21, Stageiriti & 24, Em. Fili
Thessaloniki 54352
Řecko



Distributor

CZ Pharma, s. r. o.
Náměstí Smiřických 42
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Česká republika



Stav: 9/2017

