

NÁVOD K POUŽITÍ


OČNÍ KANYLA

Zamýšlené použití

Oční kanyly jsou mikrotrubice končící hrotem, které mají mnoho tvarů a velikostí. Chirurgům napomáhají provádět určité výkony (např. pro přívod nebo odstraňování tekutin) při různých očních chirurgických postupech, jako jsou operace katarakty, refrakční, vitreoretinální operace a operace glaukomu. Jsou uloženy na hlavici, kterou lze připojit na konec ostrého nástroje, aby byly zasunuty přesnými řezy do dutin oka nebo okolní oblasti.

Další informace

1. Konstrukce

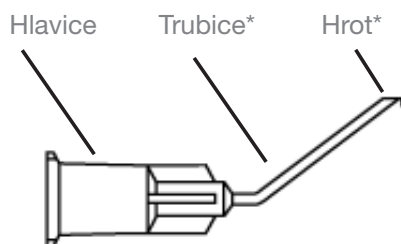

(*Tvary se liší podle popisu výrobku)

2. Materiály

Hlavice: polypropylen

(barevně rozlišená podle rozměru [Gauze] podle normy ISO 6009)

3. Obal

Každá oční kanyla je samostatně balena v pouzdře, aby byla zajištěna sterilita, a prodává se v šaržích v krabici.












Varování/bezpečnostní opatření

- přečtěte si návod k použití, dodržujte ho a uchovávejte ho.
- přečtěte si zamýšlené použití a výrobek používejte jen podle něj.
- výrobek smí používat pouze zkušený lékařský personál.
- jakékoliv nové výrobky skladujte na suchém, čistém a bezpečném místě.
- zamezte působení vysoké teploty, vysoké vlhkosti, přímého slunečního záření, promočení a uchovávejte při teplotě okolí.
- neuchovávejte na místě s výskytem chemických výrobků a plynu.
- obalový materiál uchovávejte v neporušeném a nepropíchnutém stavu.
- zkontrolujte dobu použitelnosti na každém obalu a krabici a zlikvidujte prostředky, jejichž doba použitelnosti uplynula.
- před každým použitím zkontrolujte neporušenost výrobku.
- pokud je výrobek poškozen nebo vadný, nepoužívejte ho a odložte ho stranou.

Kontraindikace – zákazy

- opakované použití je zakázáno.
- opakovaná sterilizace je zakázána.
- nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti.
- nepoužívejte, pokud máte podezření, že je stav výrobku narušen poškozeným obalem.

Značky a vysvětlivky

 Sterilizováno etylenoxidem	 Číslo dávky	 Výrobce	 Označení CE a číslo notifikovaného orgánu
 Datum expirace	 Pozor! Nahlédněte do přiloženého dokumentu	 Chraňte před slunečním světlem	 Nepoužívejte opakovaně
 Datum výroby	 Nesterilizujte opakovaně	 Nepoužívejte, jestliže je oba poškozený!	

Výrobce

SIDAPHARM GREECE
MOCHINTRA AM. DIANA
21, Stageiriti & 24, Em. Fili
Thessaloniki 54352
Řecko



Distributor

CZ Pharma, s. r. o.
Náměstí Smiřických 42
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Česká republika



Stav: 5/2016

