

# NÁVOD K POUŽITÍ


## OČNÍ SKALPELY

### Zamýšlené použití

Oční mikrochirurgické skalpely se používají při chirurgických operacích očí k provádění precizních řezů, což je jednou z podmínek pro aplikaci při složitých očních chirurgických zákrocích.

### Další informace

#### 1. Části skalpelu

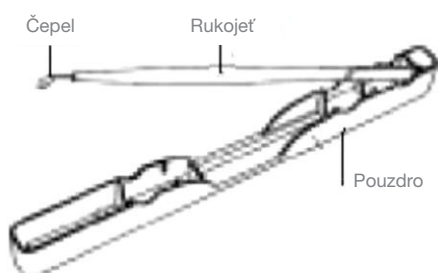

#### 2. Materiály

Čepel:	nerezová ocel
Rukojeť:	polykarbonát
Pouzdro:	polykarbonát

#### 3. Obal

Každý oční skalpel je zabalený jednotlivě v sáčku, aby byla zajištěna jeho sterilita. Tyto výrobky se prodávají v krabicích.













### Upozornění / opatření pro bezpečnou manipulaci

- Přečtěte si návod k použití, řiďte se jím a uschovejte si ho.
- Přečtěte si, jaké je zamýšlené použití výrobku, a používejte ho pouze k uvedenému účelu.
- Všechny nové výrobky uchovávejte na suchém, čistém a bezpečném místě.
- Chraňte je před vysokými teplotami, vysokou vlhkostí, přímým slunečním světlem, nenamáčejte je do tekutin a skladujte je při pokojové teplotě.
- Neskladujte je v místech, kde jsou uskladněny chemické prostředky a plyny.
- Ponechte si obalový materiál v neporušeném stavu.
- Zkontrolujte dobu použitelnosti výrobku uvedenou na každém obalu a krabici.
- Zjistíte-li, že doba použitelnosti již vypršela, takové výrobky zlikvidujte.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda části výrobku nejsou uvolněné, ohnuté, zlomené, popraskané či opotřebené.
- Jestliže zjistíte, že je výrobek poškozený nebo vadný, nepoužívejte ho, ale vyřadte. Zamezte kontaktu choulostivých čepelí skalpelů s tvrdými povrchy či jinými nástroji.

### Kontraindikace – zákazy

- Je zakázáno výrobek používat opakovaně.
- Je zakázáno výrobek opakovaně sterilizovat.
- Nepoužívejte výrobek po uplynutí doby použitelnosti.
- Nepoužívejte výrobek, jestliže byl porušený jeho aseptický obal.

## Značky a vysvětlivky

 Sterilizováno etylenoxidem	 Číslo dávky	 Výrobce	 Označení CE a číslo notifikovaného orgánu
 Datum expirace	 Uchovávejte v suchu	 Chraňte před slunečním světlem	 Nepoužívejte opakovaně
 Pozor! Nahlédněte do příloženého dokumentu	 Nesterilizujte opakovaně	 Nepoužívejte, jestliže je oba poškozený!	 Datum výroby

### Výrobce

SIDAPHARM GREECE  
MOCHINTRA AM. DIANA  
21, Stageiriti & 24, Em. Fili  
Thessaloniki 54352  
Řecko



### Distributor

CZ Pharma, s. r. o.  
Náměstí Smiřických 42  
281 63 Kostelec nad Černými Lesy  
Česká republika



Stav: 5/2016

